

Naudojimo rekomendacijos

Svarbu: prieš naudojant atlikite kapos formos individualizavimo žingsnius (žr. kitą puslapį).

Taip pat – prieš kiekvieną kapų naudojimą išsivalykite dantis.

1. Dantų kapoms užpildyti naudokite ApaCare Repair dantų gelį. Kiekvienam dančiui reikia labai nedidelio kiekio ApaCare Repair gelio (užtenka lęšio dydžio).
Žr. 1 nuotrauką.
2. Įsidėkite užpildytas ApaCare dantų kapas.
Žr. 2 nuotrauką.
3. Rekomenduojame naudoti 1-2 kartus per parą po 15 min.

Panaudojus kapas nerekomenduojame skalauti burnos vandeniu. Geresnis rezultatas bus pasiektas, jei tiesiog paliksite ApaCare Repair gelio likučius ant dantų bei burnos ertmėje.

Po kiekvieno panaudojimo gerai išplaukite ApaCare dantų kapas šaltu vandeniu bei laikykite jas saugojimo dėžutėje.




1 nuotrauka



2 nuotrauka


Kapų formos individualizavimas

Atlikite šiuos žingsnius abejoms kapos (t.y. 1 kartą viršutiniam ir 1 kartą apatiniam žandikauliui).

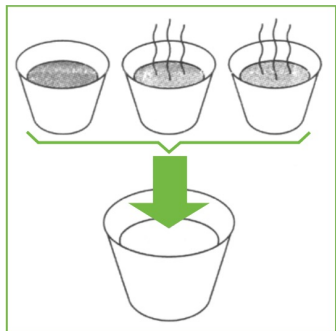


1. Žingsnis

Užvirkite 2 stiklines vandens ir supilkite verdantį vandenį į didesnį indą. Tuomet įpilkite 1 stiklinę šalto vandens. Taip vandens temperatūra inde taps maždaug 80 laipsnių.

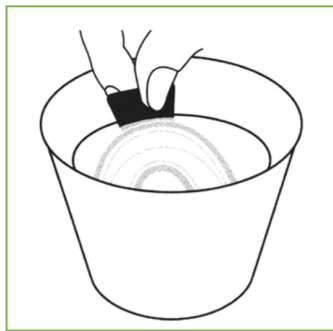


2. Žingsnis

Paimkite kapą už laikiklio ir įmerkite į vandenį. Tuomet švelniai ją judinkite ir laikykite vandenyje 15-20 sekundžių.

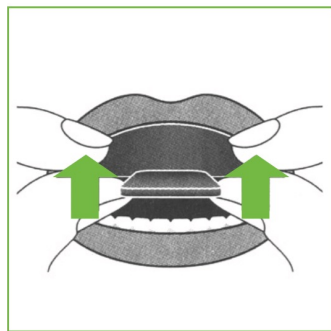

3. Žingsnis

Išėmę kapas iš vandens lengvai iškratykite vandenį iš kapų. Tuomet užsidėkite kapas ant dantų ir likite išsižioję. Pirštais spaudykite kapas iš visų pusių į dantis tam, jog kapse atkartotumėte dantų formas.

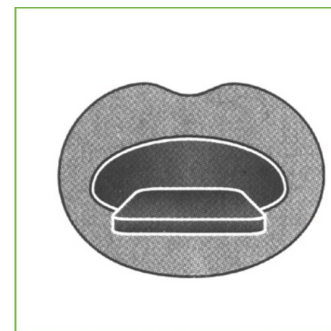

4. Žingsnis

Užsičiaupkite, tačiau nesukąskite dantimis. Stipriai iščiulpkite kapse likusį vandenį. Tuomet palikite kapas burnoje 1 min. Po to kelis kartus atsargiai šiek tiek atitraukite kapas nuo dantų bei uždėkite vėl. Taip užtikrinsite, jog kapos netaps per ankštos.



5. Žingsnis

Po maždaug 2 min. išsiimkite kapas iš burnos ir nuplaukite jas šaltu vandeniu. Tuomet žirkklėmis galite nukirpti kapų laikiklį ir perteklinę medžiagą, jog būtų patogiau jas naudoti. Jeigu kapos tapo per ankštos – pašildykite jas dar kartą ir pakoreguokite.

Atsakomybės ribojimas ir garantija

Atsakomybės apribojimas

Šis gaminys buvo sukurtas naudoti odontologijoje ir turi būti naudojamas pagal naudojimo instrukciją. Neatsakome už žalą, atsiradusią dėl netinkamo ar kitokio naudojimo. Informacija apie „Cumdente“ produktus yra pagrįsta išsamia tyrimų ir taikymo technologijų patirtimi.

Pasiliekame teisę atlikti techninius produkto kūrimo pakeitimus. Tačiau, tai neatleidžia gaminių naudotojo nuo šioje instrukcijoje pateiktų rekomendacijų ir informacijos jų naudojimui.

Tiek, kiek įstatymais leidžiamas atsakomybės atsisakymas, nei gamintojas, nei „Cumdente GmbH“, nei Proferus MB nėra atsakingi už jokių tiesioginius, netiesioginius, specialius, atsitiktinius ar pasekminius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl šio gaminio, neatsižvelgiant į teisinį pagrindą, įskaitant garantiją, sutartis ar aplaidumą.

Garantija

Gamintojas garantuoja, kad šis gaminys neturi medžiagų ir gamybos defektų. Vartotojas yra atsakingas už gaminio naudojimą. Jei gaminys apgadinamas per garantinį laikotarpį, jūsų teisių gynimo priemonė ir vienintelė gamintojo arba „Cumdente GmbH“ pareiga yra pataisyti arba pakeisti gaminį.